

# INHOUDSOPGAVE

|   |                                   |    |
|---|-----------------------------------|----|
| 1 | INTRODUCTIE                       | 2  |
| 2 | ALGEMENE RICHTLIJNEN              | 3  |
| 3 | TRIFLEXAIR ROLSTOELVASTZETSYSTEEM | 5  |
| 4 | TRIFLEXAIR STOELN & SIGNALERING   | 7  |
| 5 | FLEXUSPRO KLAPSTOEL               | 11 |
| 6 | PROTECTOR ROLSTOELVASTZETSYSTEEM  | 14 |
| 7 | ROLSTOELLIFT                      | 16 |
| 1 | OPRIJPLATEAU & OPSTAPSYSTEMEN     | 18 |
| 2 | AUTOMATISCHE DEUR                 | 19 |
| 3 | DASHBOARD SCHAKELAARS             | 20 |

## BIJLAGEN

|                              |    |
|------------------------------|----|
| VEEL GESTELDE VRAGEN         | 21 |
| ONDERDELENLIJST              | 22 |
| ONDERHOUDSCHEMA TRIBUS CHECK | 25 |



# Rolstoelbus

## Gebruikershandleiding

AS-70-190920





# VOERTUIG

KENTEKEN

MERK & TYPE

VOERTUIG IDENTIFICATIE NR

KLEUR

ROLSTOELLIFT NR

PROJECT

VOERTUIG

VAN

# AFLEVERCONTROLE

DATUM

STEMPEL & HANDTEKENING

CONTROLE  
DOOR

KM STAND

# INTRODUCTIE

Beste klant,

## **Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw rolstoelbus!**

Deze rolstoelbus is gebouwd met de grootst mogelijke aandacht voor veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit. Al onze aanpassingen aan dit voertuig voldoen ruimschoots aan de wettelijke eisen. Een prettig idee voor u en uw passagiers.

Tribus kan de veiligheid en het comfort van deze bus en de aanwezige aanpassingen echter alleen garanderen als deze correct worden gebruikt. Wij raden u daarom aan om vóór het eerste gebruik van uw rolstoelbus deze handleiding goed door te lezen om zeker te weten dat de instructies u duidelijk zijn. De instructies in deze handleiding zijn ook in video beschikbaar op onze website:

[www.tribus.nl/instructie](http://www.tribus.nl/instructie)

Heeft u vragen hebben over de aanpassingen, instructies of andere aspecten van rolstoelvervoer, dan kunt u ons gerust bellen. Wij staan u graag te woord.

Ook als zich onverhoopt een probleem voordoet, kun u op ons rekenen. Ons serviceteam staat altijd klaar, zodat u weer snel de weg op kunt.

Wij wensen u veel plezier & veilige kilometers met uw voertuig!

Tribus


**IN GEVAL VAN NOOD BELT U T 030 669 50 20**

# ALGEMENE RICHTLIJNEN


## GEBRUIK VAN ROLSTOELVASTZETSYSTEMEN

- Alle door Tribus geleverde rolstoelvastzetssystemen zijn uitsluitend bedoeld om goed vastzetbare rolstoelen in de rijrichting vast te zetten.
- De gordels van het rolstoelvastzetstelsysteem die bedoeld zijn voor de passagier dienen altijd gebruikt te worden, ook indien de rolstoel over een gordel beschikt.
- Extra accessoires of onderdelen van de rolstoel dienen stevig vast te zitten. Indien dit niet het geval is, verwijder deze dan van de rolstoel en berg ze elders in het voertuig op.
- Verwijder, indien mogelijk, extra accessoires of onderdelen van de rolstoel die zich vóór de rolstoelpassagier bevinden (behalve voetsteunen) en berg ze elders in het voertuig op.
- Gebruik de gordels zodanig dat deze niet gedraaid zitten.
- Neem altijd de aanbevolen hoeken en posities om rolstoelen vast te zetten in acht (afb. 1 en 2). Bevestig de haken aan een verticaal punt, zodat de haken niet naar links of rechts kunnen schuiven. Op veilig vervoerbare rolstoelen (ISO 7176-19) zijn de aangrijpingspunten in de regel aangegeven.

### 1. Bevestiging voorzijde rolstoel

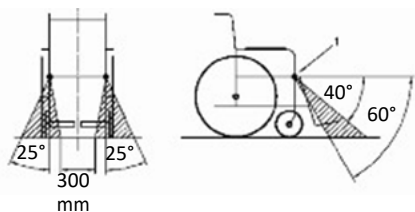


### 2. Bevestiging achterzijde rolstoel

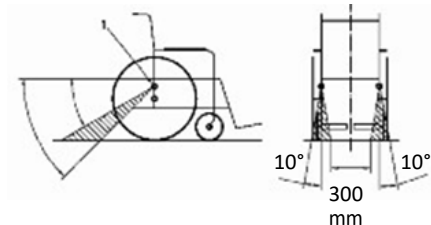

### 3. Aanleggen heupgordels

Bekijk altijd de aanbevolen hoeken van de heupgordel bij de passagier (afbeelding 3).

-  Voorkeurshoek
-  Optionele hoek

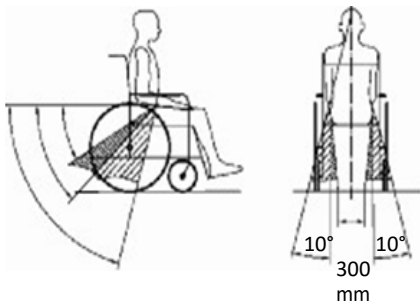

# ALGEMENE RICHTLIJNEN

## BELEID VOOR STORINGEN, REPERATIES EN OVERIGE PUNTEN

### Vervang rolstoelvastsystemen bij:

- slijtage aan het weefsel van de gordels
- slijtage/defecten aan het mechanisme
- voertuigen die betrokken zijn geweest bij een ongeval waarbij het voertuig is afgesleept

Voorkom dat de rolstoelvastzetsystemen in contact kunnen komen met scherpe randen, bijtende vloeistoffen of olie.

Gebruik bij wijzigingen, vervangingen en reparaties uitsluitend door Tribus goedgekeurde onderdelen.

**IN GEVAL VAN NOOD BELT U T 030 669 50 20**

# TRIFLEXAIR VLOER SYSTEEM

## GEBRUIK TRIFLEXAIR ROLSTOELVASTZEYSTEEM

Volg de 11 stappen om een passagier in een rolstoel veilig te vervoeren.



### STAP 1

Rij de rolstoel naar binnen en plaats deze op één van de rolstoelplekken, tussen de vier haken en vóór de centrale hendel.



### STAP 2

Ontgrendel alle haken van de betreffende rolstoelplek in één beweging door de centrale zwarte hendel naar boven te halen.



### STAP 3

Pak de vier haken van de rolstoelplek uit de vloer en bevestig deze aan de rolstoel.



### STAP 4

Let erop dat u de haken aan het frame van de rolstoel vastmaakt en niet aan andere onderdelen van de rolstoel.



### STAP 5

Druk op de rode knop om de vier haken in één beweging te vergrendelen.



### STAP 6

Beweeg de rolstoel rustig naar voren en naar achteren totdat de spanbanden strak staan. De rolstoel is nu gezekeerd.

# TRIFLEXAIR VLOER SYSTEEM

## GEBRUIK TRIFLEXAIR ROLSTOELVASTZEYSTEEM

➤➤➤ **Bevestiging dient uitsluitend door geïnstrueerd personeel uitgevoerd te worden, na raadpleging gebruikershandleiding!**




### STAP 7

Pak nu de driepuntsgordel uit de vloer.



### STAP 8

Bevestig de driepuntsgordel aan de gordelhouder die zich bevindt boven het raam.

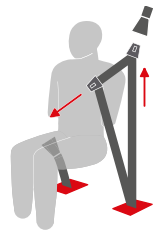

### STAP 9

Doe de gordel om bij de passagier. Let er op dat de gordel niet van het lichaam gescheiden wordt door onderdelen van de rolstoel.



### STAP 10

Pak de tweede gordeltong uit de vloer en bevestig deze aan de driepuntsgordel uit de vloer bij de heup van de passagier.



### STAP 11

Stel met behulp van de hoogteverstelband de juiste gordelhoogte en gordelhoek in. Dit punt dient boven of ter hoogte van de schouder te zijn.

### GORDELS LOSMAKEN

Om de rolstoelpassagier weer los te maken doet u eerst de riem af.

Vervolgens kunt u met de centrale hendel de vier haken ontgrendelen en deze van de rolstoel losmaken.

Let erop dat u de haken en gordels weer volledig terugplaatst in de vloer.

# TRIFLEXAIR STOEL

## INSTRUCTIE UITKLAPPEN TRIFLEXAIR STOEL

Volg de 5 stappen om de TriflexAIR stoel uit te klappen.



### STAP 1

Trek aan de rode hendel om de stoel te deblokkeren.



### STAP 2

Draai de stoel richting het gangpad. Laat de hendel los, zodat de stoel in het slot kan vallen.



### STAP 3

Positie van de stoel nadat deze volledig gedraaid is in de rijrichting.



### STAP 4

Duw het stoelkussen naar beneden.



### STAP 5

Indien nodig, stel de hoofdsteun in de juiste positie.

# TRIFLEXAIR STOEL

## INSTRUCTIE INKLAPPEN TRIFLEXAIR STOEL

Volg de 5 stappen om de TriflexAIR stoel in te klappen.



### STAP 1

Duw het stoelkussen naar beneden.



### STAP 2

Trek aan de rode hendel om de stoel te deblokkeren.



### STAP 3

Draai de stoel richting het raam. Laat de hendel los, zodat de stoel in het slot kan vallen.



### STAP 4

Positie van de stoel nadat deze volledig gedraaid is richting het raam.



### STAP 5

Om het zicht voor andere passagiers niet te blokkeren duwt u de hoofdsteun naar beneden.



# TRIFLEXAIR SIGNALERING SYSTEEM

## OMSCHRIJVING SIGNALERING SYSTEEM



TriflexAIR is optioneel voorzien van een signalering systeem. Het systeem waarschuwt de chauffeur als de rolstoel niet goed is vastgezet. Dit draagt bij aan de veiligheid van de passagiers.

Het signalering systeem is te herkennen aan de rode lamp op het dashboard rechts naast het stuur, zie foto links.

## BETEKENIS RODE LAMP



- Als de lamp rood oplicht zijn één of meerdere rolstoelen niet goed vastgezet. Loop naar het passagiersgedeelte en druk op de rode knop naast de hoofdontgrendeling om de rolstoel vast te zetten. Doe dit bij elke rolstoel passagier.

- Stel altijd met eigen ogen vast dat de rolstoel goed is aangehaakt en dat de passagier de driepuntsgordel omheeft.
- Zitten er geen passagiers in de bus? Controleer dan of de haken goed in hun behuizing liggen en of de centrale grendel en het rode pedaal zijn ingedrukt.

# FLEXUSPRO STOEL

## INSTRUCTIE UITKLAPPEN FLEXUSPRO STOEL

Volg de 5 stappen om de FlexusPro stoel uit te klappen.



### STAP 1

Duw of trek aan de rode hendel om deze te deblokkeren.



### STAP 2

Draai de klapstoel naar achteren totdat deze in de vergrendeling valt.



### STAP 3

De stoel staat nu vergrendeld in de zitpositie.



### STAP 4

Trek aan de zwarte knop om de zitting te ontgrendelen.



### STAP 5

Klap de zitting naar beneden totdat de zitting in de vergrendeling valt.



### STAP 6

Desgewenst kan de passagier de armlegger neerklappen voor meer comfort.

# FLEXUSPRO STOEL VASTZETTEN

## INSTRUCTIE FLEXUSPRO STOEL VASTZETTEN IN DE RAIL

**>>> Bevestiging dient uitsluitend door geïnstrueerd personeel uitgevoerd te worden, na raadpleging gebruikershandleiding!**

De FlexusPRO stoelen kunnen vastgezet worden op twee manieren;

1. Vast (afbeelding 1)
2. Door gebruik van lockables (zie onderstaande 3 stappen)



Afbeelding 1

### OPTIONEEL

De lockables kunnen optioneel zijn uitgevoerd met transportwielletjes voor het makkelijk verplaatsen van de stoel.

### ONDERHOUD

Check de lockables regelmatig op schade of onjuist functioneren. Indien zich problemen voorzien, los deze direct op en vervang defecte onderdelen.



#### STAP 1

Plaats de stoel zodanig op de rails, dat de fittingen in de openingen komen te staan.



#### STAP 2

Draai de spanknoppen een kwartslag en verschuif de stoel zodanig dat de T-stiften in de plunjer vallen.



#### STAP 3

Draai de spanknoppen rechtsonder handvast. De stoel staat nu vergrendeld in de rails.

# FLEXUSPRO STOEL LOSMAKEN

## INSTRUCTIE FLEXUSPRO STOEL LOSMAKEN VAN DE RAIL

➤➤➤ **Bevestiging dient uitsluitend door geïnstrueerd personeel uitgevoerd te worden, na raadpleging gebruikershandleiding!**



### STAP 1

Draai de twee zwarte spanknoppen linksom los.



### STAP 2

Til vervolgens de spanknoppen iets op en draai ze een kwartslag naar links.



### STAP 3

De T-stiften liggen nu op de plunjer. De stoel staat nu vrij in de rails.



### STAP 4

Schuif de stoel iets naar achteren, zodat dat de fittingen vrij in de rails komen te staan. Kantel de stoel achterover en neem hem uit de rails.

# FlexusPro

# PROTECTOR ROLSTOELVASTZETSYSTEEM

## INSTRUCTIE PROTECTOR ROLSTOELVASTZETSYSTEEM

»»» Volg de 10 stappen om de rolstoel vast te zetten.



### STAP 1

Retractors haalt u uit de rail door aan de ring te trekken en de retractor te verschuiven. Als de retractor vrijkomt, kunt u hem uit de rail tillen.



### STAP 2

Retractors haalt u uit de rail door aan de ring te trekken en de retractor te verschuiven. Als de retractor vrijkomt, kunt u hem uit de rail tillen.



### STAP 3

Plaats eerst de voorste retractors en bevestig de haken aan het frame van de rolstoel. Het indrukken van de rode knop ontgrendelt de haak.



### STAP 4

Plaats de achterste retractors (met gordeltong) voor fixatie achterzijde en plaats de haken aan het frame van de rolstoel.



### STAP 5

Gebruik de rode gordel als heupgordel. Bevestig de gordelhouders aan de gordeltongen van de retractors.



### STAP 6

Stel de maat van de heupgordel in en maak deze vast.

# PROTECTOR ROLSTOELVASTZETSYSTEEM

## INSTRUCTIE PROTECTOR ROLSTOELVASTZETSYSTEEM

➤➤➤ Bevestiging dient uitsluitend door geïnstrueerd personeel uitgevoerd te worden, na raadpleging gebruikershandleiding!



### STAP 7

Plaats het driepuntsgordelhuis in de rail achter de rolstoel aan raanzijde (links of rechts).



### STAP 8

Klik de adapter van de zwarte gordel in de bovenrail, in "lijn" met het driepuntsgordelhuis.



### STAP 9

Pak de zwarte gordel en leg deze om de rolstoelgebruiker aan.



### STAP 10


Bevestig vervolgens de gordelhouder van de zwarte gordel aan de gordeltong van de rode gordel.



# ROLSTOELLIFT

## INSTRUCTIE GEBRUIK LIFT AMF-BRUNS LINEAR AL1 SOLID

- Lees voor gebruik de instructiesticker op de lift.
- Zet de rolstoel op de lift altijd met twee remmen vast.

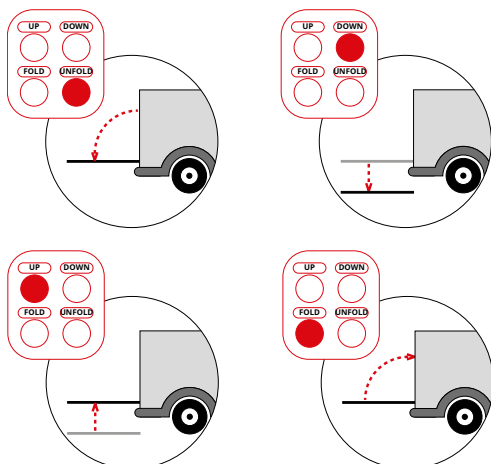

De handrukschakelaar heeft 4 knoppen.



### STAP 1

Plaats de deuren wijd open. Zet de rode hoofdstroomschakelaar op de lift aan. Sta rechts naast de lift en pak de handrukschakelaar. Zorg ervoor dat er zich niets onder de lift bevindt en deze in vrije beweging naar beneden kan.



### STAP 2

Druk de knop 'unfold' om het platform naar een horizontale positie te brengen. Druk daarna de knop 'down' om de lift naar straatniveau te laten zakken. De gele beugels openen automatisch als het platform de grond raakt.



### STAP 3

Duw de rolstoel op het plateau en activeer de remmen van de rolstoel. De gele hendels bieden houvast aan de rolstoelpassagier. De chauffeur bedient de lift op het plateau achter de rolstoel of op de grond naast de lift.



### STAP 4

Druk op 'up' om het platform omhoog te laten gaan naar een horizontale positie. Duw daarna de rolstoelgebruiker naar binnen en zet deze vast met het rolstoelvastzetsysteem. Druk daarna op 'fold' om het plateau in verticale positie te brengen. Zet de hoofdstroomschakelaar uit en sluit de deuren voor vertrek.

# OPRIJPLATEAU

## INSTRUCTIE VOOR GEBRUIK AMF-BRUNS OPRIJPLATEAU



### STAP 1

Druk aan beide zijde op de press knop om het oprijplateau te deblokken. Trek tegelijkertijd voorzichtig het plateau naar u toe.



### STAP 2

De gasveer zorgt ervoor dat het plateau eenvoudig en licht te bedienen is. U kunt met weinig inspanning het plateau in- of uitklappen. Controleer bij het inklappen of de gordelhouders weer vast zitten!

### OPTIONEEL

Het plateau kan optioneel zijn uitgerust met ster knoppen (zie afbeelding) om het plateau eenvoudig te demonteren. Als u de ster knoppen losdraait, is het plateau met twee man eenvoudig uit het voertuig te tillen.



# OPSTAPSYSTEMEN

## INSTRUCTIE VOOR GEBRUIK MECHANISCHE OPSTAP



### STAP 1

Als de trede is uitgeklapd dient deze als opstap.



### STAP 2

Als trede is ingeklapt dekt deze de instapbak af.

## INSTRUCTIE VOOR GEBRUIK ELECTRISCHE OPSTAP



### STAP 4

De trede bij de zijschuifdeur wordt bediend door een schakelaar bij de instap of op het dashboard. Optioneel kan de bediening automatisch met een controle-unit over de zijschuifdeur worden geschakeld.

De elektrische trede is standaard voorzien van een rode signaallamp op het dashboard die geschakeld is met het contact. Deze gaat branden als de trede is uitgeschoven.

## ONDERHOUD

- Regelmatig reinigen met druklucht of water (tuinslang of hogedrukreiniger)
- Na het reinigen smeren met siliconen- of cockpitspray

**GEBRUIK GEEN VET OF ANDERE SMEERMIDDELEN!**

# AUTOMATISCHE DEUR

## INSTRUCTIE GEBRUIK AUTOMATISCHE DEUR



Er zijn twee type automatische deuren. Een originele voordeur opent naar voren (A-stijl), een glazen voordeur opent naar achteren (B-pillar).

Duw op de rode knop om de deur te openen of te sluiten. De rode knop bevindt zich op het dashboard, aan de rechterzijde van het stuur.

Optioneel is de deur over de handrem ingeschakeld. De deur kan dan alleen bediend worden indien het voertuig op de handrem staat.



### NOODBEDIENING

- Gebruik tijdens de ritten alleen de rode knop om de deur te openen en te sluiten. Handmatig bedienen van de deur is alleen toegestaan in noodgevallen!
- Ga alleen rijden als de rode lamp niet brandt! Dit betekent dat de deur wel vergrendeld is, maar in noodgevallen toch van buitenaf te openen is.
- Open de deur nooit tijdens het rijden!



Bedien in nood de deur handmatig door aan de rode hendel te trekken.

Als de noodontgrendeling actief is, zal op het dashboard het kleine rode lampje branden. Dit geldt ook indien de noodontgrendeling aan de buitenkant geblokkeerd is.



# DASHBOARD SCHAKELAARS

## OPTIONEEL: SCHAKELAARS OP HET DASHBOARD

Afhankelijk van het voertuig en de gekozen opties kunnen onderstaande schakelaars aanwezig zijn op het dashboard.

### Mercedes-Benz & Volkswagen



↑  
1

↑  
2

↑  
3

↑  
4

### Ford, Renault & Opel



↑  
1

↑  
2

↑  
3

↑  
4

↑  
5

## OMSCHRIJVING SCHAKELAARS

- |                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Binnenverlichting:       | Omhoog is dagverlichting. Naar beneden is nachtverlichting.                   |
| 2. Dak ventilator           | Omhoog is lucht naar buiten blazen, naar beneden is lucht naar binnen zuigen. |
| 3. Warmwaterkachel:         | In- of uitschakelen van de warmwaterkachel in de passagiersruimte.            |
| 4. Optische signalering:    | In/ uitschakelen optische signalering, (o.a. zwaailampen/ daklichten)         |
| 5. Akoestische signalering: | In/ uitschakelen testische signalering (o.a. sirenes/ hoorns)                 |



The rode knop is alleen beschikbaar in voertuigen met een automatische deur. De knop opent of sluit de deur.

# VEEL GESTELDE VRAGEN

## DE LIFT REAGEERT NIET MEER. WAT MOET IK DOEN?

Het is mogelijk dat de hoofdstroom van de lift per ongeluk uitgeschakeld is of de lift is in stand-by modus gegaan. De rode schakelaar bevindt zich bovenop de bak van de lift. Draai de stroomschakelaar uit en weer aan, bedien de lift opnieuw. Lost dit het probleem niet op, kijk dan in de speciale handleiding van de lift.

## WELKE OLIE MOET IK GEBRUIKEN VOOR DE AMF-BRUNS "LINEARLIFT AL1"?

De AMF Linearlift maakt gebruik van ATF - D II D olie. Het hoeft eigenlijk niet nodig te zijn om dit bij te vullen. Is dit toch vaak het geval, neem dan contact op met Tribus via 030 669 5027.

## IS EEN LIFT PERIODIEKE KEURING (LPK) VERPLICHT?

Ja, Arbo-wetgeving verplicht het periodiek controleren en onderhouden van personenliften. Daarnaast kunt u bij eventuele ongevallen aansprakelijk worden gesteld als er geen LPK is uitgevoerd. Ook is het natuurlijk voor uzelf, uw personeel en klanten fijn om te weten dat de lift veilig werkt.

## EEN GORDEL IS GERAFFELD. MAG IK DEZE NOG GEBRUIKEN?

Nee, om de veiligheid van de passagiers te garanderen dienen gordels altijd in goede staat te zijn. Dit geldt zowel voor de gordels van de stoelen als die van de rolstoelvastzetsystemen.

## DE STOELN RAMMELN. WAT MOET IK DOEN?

Kijk eerst of de stoelen op de juiste plek staan (alleen bij demontabele stoelen). Controleer vervolgens de snelsluiters goed vastzitten en zet deze eventueel opnieuw vast. Als de stoel nog steeds rammelt, neem dan contact op met Tribus.

## WAT MOET IK DOEN ALS ER IEMAND TUSSEN EEN SLUITENDE AUTOMATISCHE DEUR KOMT?

De automatische deuren zijn voorzien van beveiliging tegen inklemming. Als de deur bij het sluiten tegendruk ondervindt, stopt hij met sluiten en gaat weer open. Let wel altijd op bij het sluiten, voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen!

## WAAR VIND IK DE ZEKERINGEN VAN DOOR TRIBUS INGEBOUWDE ONDERDELEN?

De zekeringen van de door Tribus ingebouwde onderdelen bevinden zich onder de bestuurdersstoel. Vermoedt u een kapotte zekering bij de lift, controleer dan eerst of de hoofdstroomschakelaar wel goed staat. (Zie eerste vraag.)

## VERVANGINGSONDERDELEN VAN TRIFLEXAIR VLOERSYSTEEM

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| A-0000256005 | Trekhendel centrale ontgrendeling               |
| 0000703001   | Driepuntsgordel                                 |
| 0000703002   | Gordelvanger voor driepuntsgordel               |
| 0000256501   | Binnenbuiten kabel naar voorliggende retractor  |
| 0000256500   | Binnenbuitenkabel naar achterliggende retractor |
| 0000256152   | Achterliggende retractor                        |
| 0000703005   | Voorliggende retractor                          |




# ONDERDELEN ROLSTOELLIFT



## ONDERDELEN AMF-BRUNS "LINEARLIFT AL1"

Onderstaande onderdelen zijn te bestellen via onze webshop ([www.tribus.nl/webshop](http://www.tribus.nl/webshop)) of via 030 - 669 50 27.

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 0000752112 | Aluminum brugplaat                       |
| 0000752245 | Afdekkap (model na 2017)                 |
| 0000752152 | Afdekkap (model voor 2017)               |
| 0000752161 | Rechter torsieveer voor afrolbeveiliging |
| 0000752163 | Linker torsieveer voor afrolbeveiliging  |
| 0000752162 | Kniegewricht                             |
| 0000752164 | As voor afrolbeveiliging                 |
| 0000752165 | Gasveer (130mm)                          |
| 0000752166 | Rechter beschermingsplaat                |
| 0000752167 | Linker beschermingsplaat                 |
| 0000752168 | Markeerverlichting LED                   |
| 0000752169 | Handgreetang                             |
| 0000752170 | Rechter blokkeerhevel                    |
| 0000752171 | Linker blokkeerhevel                     |
| 0000752155 | Cilinder hydraulisch                     |

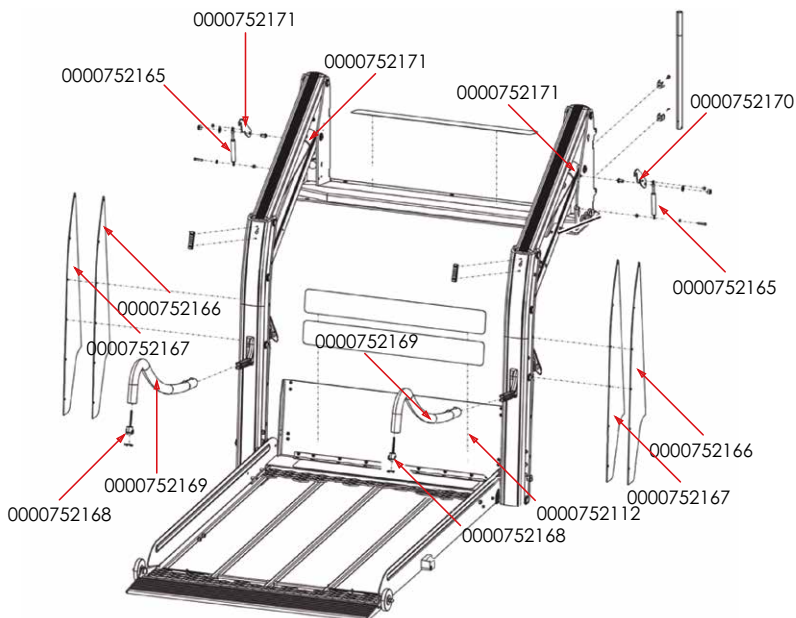

# DIAGRAM ROLSTOELLIFT

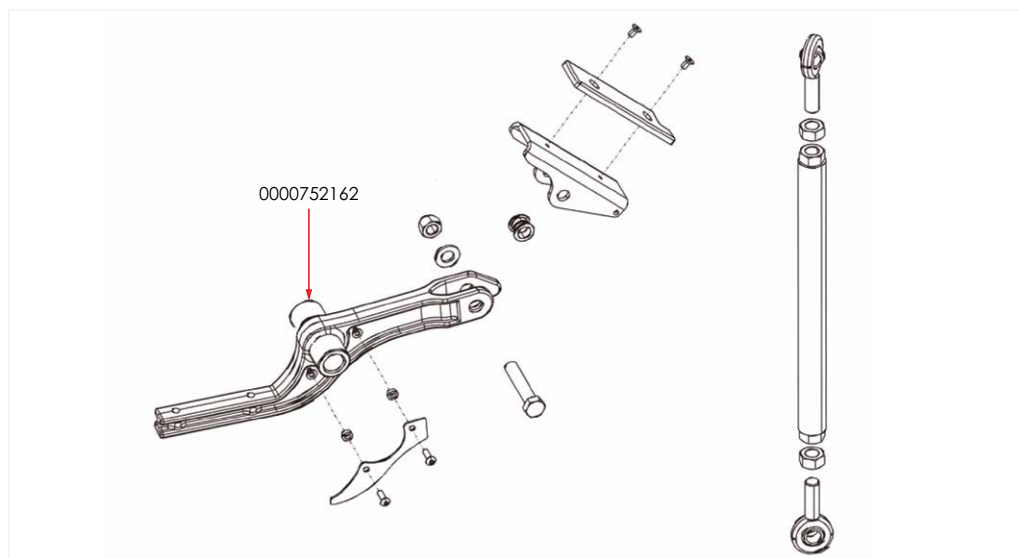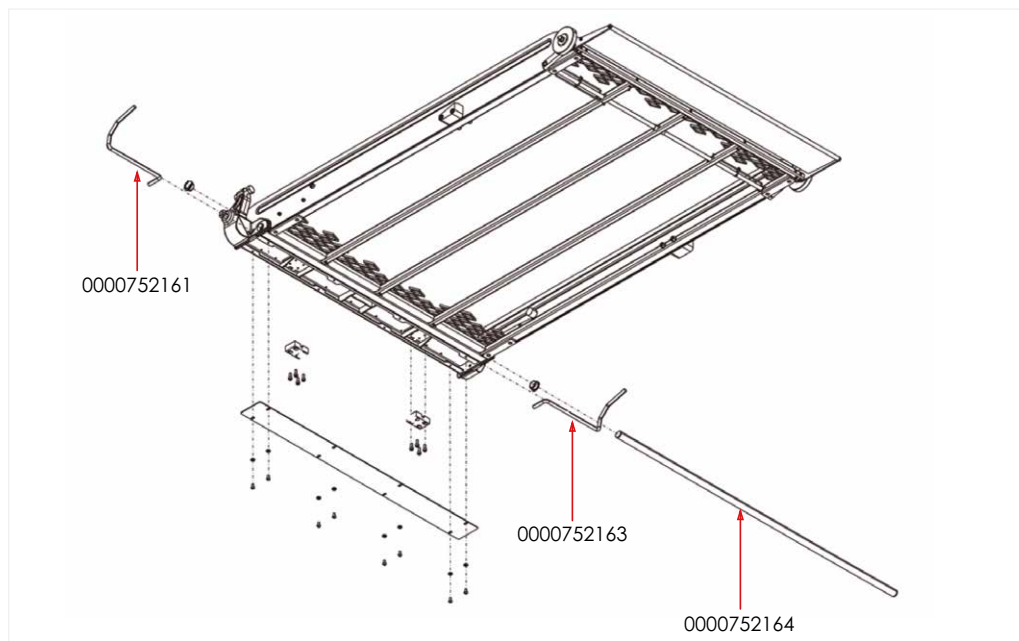

## TRIBUS CHECK

DATUM

PROJECTNUMMER

KM STAND

LPI

JA

NEE

REPARATIE\*

JA

NEE

CONTROLE  
DOOR

STEMPEL & HANDTEKENING

\* Zie bijgevoegde checklist voor uitgevoerde werkzaamheden.

## TRIBUS CHECK

DATUM

PROJECTNUMMER

KM STAND

LPI

JA

NEE

REPARATIE\*

JA

NEE

CONTROLE  
DOOR

STEMPEL & HANDTEKENING

\* Zie bijgevoegde checklist voor uitgevoerde werkzaamheden.

## TRIBUS CHECK

DATUM

PROJECTNUMMER

KM STAND

LPI

JA NEE

REPARATIE\*

JA NEE

CONTROLE  
DOOR

STEMPEL & HANDTEKENING

\* Zie bijgevoegde checklist voor uitgevoerde werkzaamheden.

## TRIBUS CHECK

DATUM

PROJECTNUMMER

KM STAND

LPI

JA NEE

REPARATIE\*

JA NEE

CONTROLE  
DOOR

STEMPEL & HANDTEKENING

\* Zie bijgevoegde checklist voor uitgevoerde werkzaamheden.

## TRIBUS CHECK

DATUM

PROJECTNUMMER

KM STAND

LPI

JA

NEE

REPARATIE\*

JA

NEE

CONTROLE  
DOOR

STEMPEL & HANDTEKENING

\* Zie bijgevoegde checklist voor uitgevoerde werkzaamheden.

## TRIBUS CHECK

DATUM

PROJECTNUMMER

KM STAND

LPI

JA

NEE

REPARATIE\*


JA

NEE

CONTROLE  
DOOR

STEMPEL & HANDTEKENING

\* Zie bijgevoegde checklist voor uitgevoerde werkzaamheden.

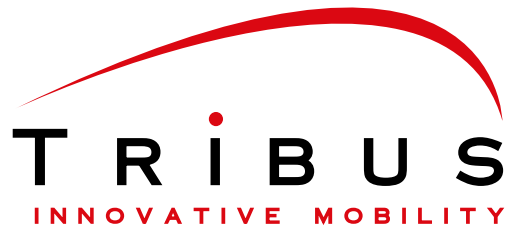



Creators of **innovative mobility**

All rights reserved. All information may be subject to changes and typographical errors.

Proostwetering 71  
3543AC UTRECHT

The Netherlands  
+31 30 669 50 20

[info@tribus-group.com](mailto:info@tribus-group.com)  
[www.tribus-group.com](http://www.tribus-group.com)